




2K140/141/142/143/144/145/146/147

Pièces de rechange

Spare Parts

Ersatzteile

Piezas de repuesto

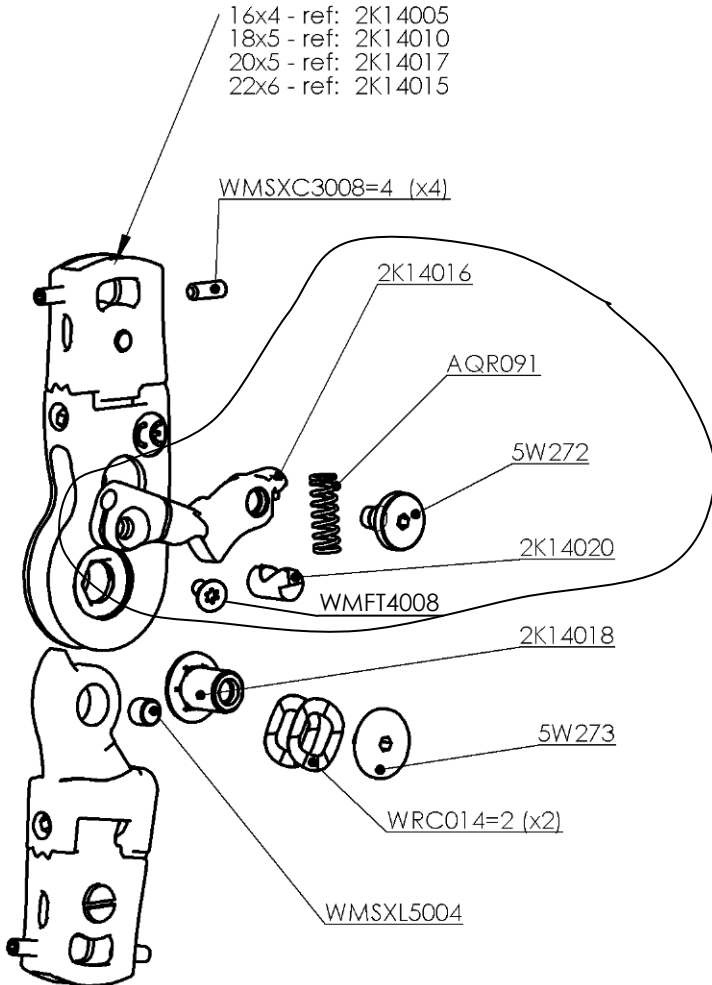


HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR

6, rue de la Redoute - Z.I. Saint-Apollinaire
 B.P. 37833 - 21078 Dijon Cédex - France
 TÉL. : 33 (0)3 80 78 42 10 - FAX : 33 (0)3 80 78 42 15
 www.proteor.com - ht.orthopedie@proteor.com

Remplacement du verrou. *Lock replacement.*
Ersetzen der Sperre. *Método para remplazar el cierre de gatillo.*


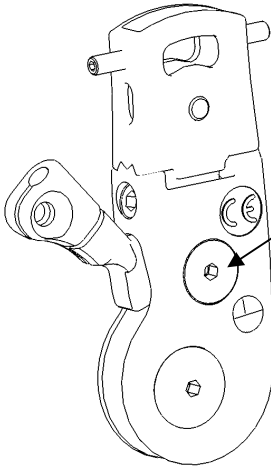


Décoller en chauffant avec un pistolet a air chaud.

*Unstick by heating with a thermo-gun
 Zum Ablösen, mit einem warmen Luft
 pistole erwärmen.*

*Caliente el tornillo de fijación del
 gatillo para despegarlo.*

Remplacer ces 5 pièces.
Replace these 5 parts.
 Diese 5 Teile ersetzen.
Replace las 5 piezas.

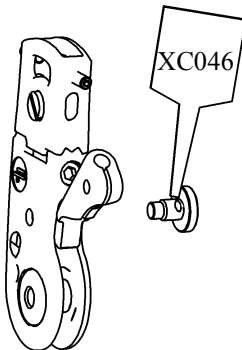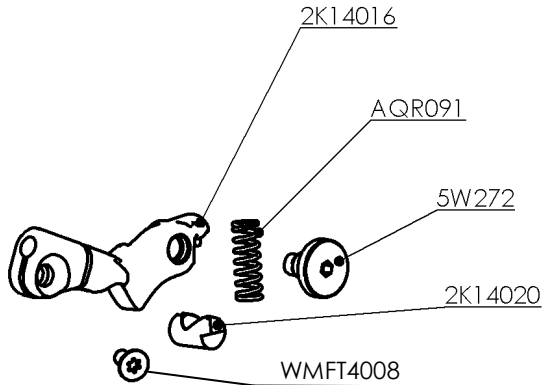

Coller la vis sur le verrou.

Stick the screw on the lock.

Die Schraube auf der Sperre kleben.

*Aplique el pegamento sobre el tornillo del
 gatillo.*